

INSTRUKTION UTBYTE AV LARMKLOCKA

Programmering av larmklocka till Trygghetslarm Careline IP/GSM Tunstall

OBS! VIKTIGT SE ALLTID TILL ATT TA TILLBAKA DEN TRASIGA LARMKLOCKAN HOS LARMBRUKAREN DÅ DEN INTE KOMMER ATT FUNGERA NÄR NI PROGRAMMERAT IN EN NY.

OM LARMKLOCKAN ÄR BORTTAPPAD SÅ INFORMERA LARMBRUKAREN ATT DEN GAMLA LARMKLOCKAN INTE KOMMER ATT FUNGERA, DEN UPPHITTADE LARMKLOCKAN SKA LÄMNAS TILLBAKA TILL HEMVÅRDEN.

PROVLARMA ALLTID MED DEN NYA LARMKLOCKAN TILL TRYGGHETSJOUREN OCH TALA OM ATT NI PROGRAMMERAT IN EN NY LARMKLOCKA.

- 1. Se till att apparaten är avstängd med On Off knappen på baksidan.**
(du måste ta bort hela baksidan genom att dra ner plastkåpan för att komma åt ON/OFF knappen).
- 2. Tryck in den röda knappen på apparatens ovansida håll den intryckt hela tiden, sätt sedan på apparaten med On knappen.**
- 3. Vänta tills EN signal hörs och släpp den röda knappen.**
(får du flera signaler/pip så börja om)
Tryck på larmklockan, Trygghetslarmet svarar med pipljud.
Vänta ca 2 min tills alla lampor slutat blinka.
Provlarma med larmklockan.



INSTRUKTION UTBYTE AV LARMKLOCKA

Programmering av larmklocka till Trygghetslarm Lifeline Digital Tunstall

OBS! VIKTIGT SE ALLTID TILL ATT TA TILLBAKA DEN TRASIGA LARMKLOCKAN HOS LARMBRUKAREN DÅ DEN INTE KOMMER ATT FUNGERA NÄR NI PROGRAMMERAT IN EN NY.

OM LARMKLOCKAN ÄR BORTTAPPAD SÅ INFORMERA LARMBRUKAREN ATT DEN GAMLA LARMKLOCKAN INTE KOMMER ATT FUNGERA, DEN UPPHITTADE LARMKLOCKAN SKA LÄMNAS TILLBAKA TILL HEMVÅRDEN.

PROVLARMA ALLTID MED DEN NYA LARMKLOCKAN TILL TRYGGHETSJOUREN OCH TALA OM ATT NI PROGRAMMERAT IN EN NY LARMKLOCKA.

- 1. Se till att apparaten är avstängd med On Off knappen på baksidan.**
(du måste ta bort hela baksidan genom att dra ner plastkåpan för att komma åt ON/OFF knappen).
- 2. Tryck in den röda knappen på apparatens ovansida håll den intryckt hela tiden, sätt sedan på apparaten med On knappen.**
- 3. Vänta tills En melodi hörs följt av Ett pip släpp den röda knappen.**
(får du flera signaler /pip så börja om)
Tryck på larmklockan, Trygghetslarmet svarar med pip ljud.
Vänta ca 2 min tills alla lampor slutat blinka.
Provlarma med larmklockan.

